

Крок 1: Увімкнення електроживлення системи

Короткий посібник із встановлення



1. Підключіть кабелі живлення I/A консолі та високочастотний генератор. Увімкніть і встановіть потужність на бажаний лікарем рівень зазвичай «0.8»



2. Встановіть регулятор потоком у положення "Потік 1 / Flow 1" (положення на 10 годин).



3. Затисніть чорну кнопку на Ніжній педалі, доки індикатор клапана із затискачем не згасне.



4. Встановіть регулятор потоку в положення «Очікування / Standby» (положення на 9 годин).

Крок 2: Плівка лотка на кронштейні



1. Повністю висуньте Лоток на кронштейні пересувної стійки.



2. Просуньте руки в рукав великої плівки, просуньте відкритий кінець плівки на лоток, потім повністю обтягніть лоток плівкою.



3. Натисніть на плівку в отвір лотка, щоб вийшла кишеня.

Крок 3: Налаштування гідросистеми



1. Закрийте Роликовий затискач на Лінії іригації



2. Відкрийте повітряний клапан Крапельниці та ємність збалансованого сольового розчину/BSS. Наповніть Крапельницю щонайменше на половину.



Підвісьте ємність BSS на гачок Пересувного штатива I/V і високо підніміть його.



Відкрийте кришку насоса. За допомогою трубки з лівого боку встановіть сбороприймач на штифти. Прокладіть силіконову трубку через центр роликів насоса



5. Утримуйте силіконову трубку в місці затиску, без натяжки, розмістивши з лівого боку V-блоку, закрийте кришку.



6. Встановіть регулятор потоком трубки іригації в місцях затискування (положення на 8 годин).



7. Затисніть кінці силіконові трубки іригації в місцях затискування і ковзанням вгору-вниз, з протягом протягніть її в Слот клапана з затискачем. В кінці потягніть вниз, щоб розташувати верхній затискач в слот, щоб уникнути перегинів трубки.



8. Встановіть регулятор потоком у положення «Очікування / Standby» (положення на 9 годин)

Крок 4: Підключення наконечника та Підготовка гідросистеми



1. Повністю вставте штекер наконечника у біполярні виходи Генератора високих частот.



2. Акуратно підключіть лінію іригації до гнучкого провідника іригації Наконечника (обидва мають кольорову смугу).



3. У місці з ковпачком, встановіть наконечник кінчиком вгору.



4. Встановіть регулятор подачі в положення «Підготовка / Prime» (положення на 8 годин).



5. Відкрийте роликовий затискач, дозволяючи збалансованому сольовому розчину /BSS заповнити лінію іригації. Як тільки BSS з'явиться на кінчику наконечника, повністю відкрийте Роликовий затискач.



6. Як тільки BSS заповнить ковпачок до кінчика наконечника або вийде з гнучкого провідника аспірації, перемістіть наконечник в положення кінчиком вниз (ковпачок на місці)



7. Обережно підключіть лінію аспірації. Продовжуйте заповнювати доти, доки BSS не почне з'являтися в сбороприймачі і всі лінії не очистяться від бульбашок повітря.



8. Встановіть регулятор потоком у положення «Чекання / Standby», до моменту позиціонування Ножної Педалі для проведення хірургічних операцій.




9. Встановіть Регулятор потоком у віддане хірургом положення, як правило «Подача 3 / Flow 3» (положення на 12 годин)



10. Накрийте малою захисною плівкою I/A консоль і Генератор високих частот і переконайтеся, що трубка іригації не перегинається в місці затискання.

Крок 5: Підключення I/A канюлі

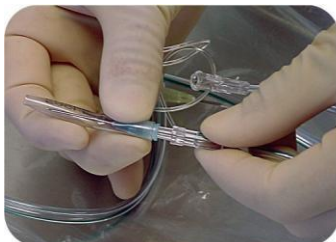

1. Вимкніть гнучкі трубки Наконечника від лінії іригації та аспірації. Розділіть подвійну трубку на відрізки довжиною 1 фут / 30,5 см.



2. Підключіть обидві лінії до I/A канюлі; використовуйте адаптер на довгій лінії I/A канюлі. Розправте довгу лінію I/A канюлі.



3. Примітка: Передайте I/A канюлі хірургу, довгою лінією з лівого боку, щоб всмоктувальний канал був зверху.



Technical Support
9492491996 - 24/7

NeoMedix, 15042 Parkway Loop, Suite A, Tustin CA 92780, USA

TRABECTOME®
micro-surgical management of glaucoma